



M. BARTELS
REHA IM- & EXPORT GMBH

Bedienungsanleitung

Adapter für Juniorplattform SA-S/3



JUNIORPLATTFORM

Diese Bedienungsanleitung gilt nur im Zusammenhang mit der Bedienungsanleitung „TREPPENKULI SA S/3“

ANBAU DES ADAPTERS AN DEN TREPPENKULI

- 1) Das Verbindungselement des Adapters an der Lochleiste der Säule anlegen, Position auf Höhe des 1. Lochs (von unten gezählt). (Abb. 1 und 2)
- 2) Den Adapter von vorn ansetzen und mit Hilfe der Schrauben (4 Stück, M8x20) an die Säule montieren. (Abb. 3)
Die Schrauben „fest“ anziehen.
- 3) Die Juniorplattform von oben in den Adapter einhängen. (Abb. 4)
- 4) Nach dem Einhängen der Juniorplattform, die beiden Verriegelungsschrauben (M6x16) in die dafür vorgesehenen Löcher montieren.
Die Verriegelungsschrauben „handfest“ anziehen. (Abb. 5)
- 5) Die Montage des Adapters ist jetzt abgeschlossen und der Rollstuhl kann auf der Juniorplattform fixiert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Nutztragfähigkeit des Treppenkulis SA-S/3 um das Eigengewicht der JUNIORPLATTFORM (16 kg) verringert wird.

Das bedeutet, dass die max. Traglast des Treppenkulis bei Einsatz zusammen mit der Junior-Plattform nur noch 134 kg SA-S und 144 kg SA-3 (Person + Rollstuhl) beträgt!



NOTIZEN

VERKAUFSAGENTEN

Austria/Czech

Lehner Lifttechnik GmbH Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Phone: +43 7278 3514
Fax: +43 7278 3514-12
office@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Belgium

Metra bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent
Phone: +32 9227 7174
Fax: +32 9227 0280
info@metra.be
www.metra.be

Bulgaria

Pro-Lift Bulgaria Ltd.
Krasno Selo 191
1612 Sofia
Phone: +359 886 097189
office@pro-lift.eu
www.pro-lift.eu

Denmark

Trappetjeneren ApS
Arnold Niensens Boulevard 64A
2650 Hvidovre
Phone: +45 31 728500
Fax: +45 70 141206
mail@trappetjeneren.dk
www.trappetjeneren.dk

Finland

Apuväline Lähdemäki Oy
Simakankatu 11
30420 Forssa
Phone: +358 400 483258
Fax: +358 342 40699
sales@apuvalinelahde.fi
www.apuvalinelahde.fi

France

Reha-Trans
4 Rue des Forgerons
68600 Wolfgantzen
Phone: +33 389 791777
Fax: +33 389 791924
info@reha-trans.fr
www.reha-trans.fr

Germany

SOBRATEC GmbH
Schluckenauer Straße 11a
02689 Sohland/Spree
Phone: +49 35936 45981
Fax: +49 35936 30982
info@sobratec-treppenlifte.de
www.sobratec-treppenlifte.de

Germany

ANGO Reha Technik Vertriebs GmbH
Stemeler Strasse 99
59846 Sundern
Phone: +49 2933 9218800
Fax: +49 2933 9218809
info@ango-reha.de
www.ango-reha.de

Germany

Perfekta-Lift GmbH
Glehner Heide 1
41352 Korschenbroich
Phone: +49 2182 886060
Fax: +49 2182 8860610
info@perfekta-lift.de
www.perfekta-lift.de

Germany

Prüfer & Co. Aufzugbau GmbH
Ruhlaer Straße 9
14199 Berlin
Phone: +49 30 8264838
Fax: +49 30 8266469
info@pruefer-aufzugbau.de
www.pruefer-aufzugbau.de

Germany

Süddeutsche Sanilift GmbH
Pflasterackerstr. 60
70186 Stuttgart
Phone: +49 711 51865275
Fax: +49 711 51865278
info@sanilift.de
www.sanilift.de

Germany

Strehlow GmbH
Havelstraße 23
39126 Magdeburg
Phone: +49 391 505660
info@strehlow.info
www.strehlow.info

Greece

Konstantinos Dederis
62 Argiroupoleos
16451 Athen
Phone: +30 2105443894
Mobil: +30 6948245364
kdederis@yahoo.gr
www.dederis-orthopedika.gr

Hungary

Aluhit KFT
Uttörö u. 20
2510 Dorog
Phone: +36 209224777
Fax: +36 633502791
info@aluhit.hu
www.aluhit.hu

Hungary

Nyír-Lift Kft
Debreceni út 236
4400 Nyíregyháza
Phone: +36 30 6773070
Fax: +36 42 490454
info@nyirlift.hu
www.nyirlift.hu

Israel

Galim Import & Marketing Ltd.
Mosav Amatz
Shnei Alonim 1
38870 Omets
Phone: +972 72 2116000
Fax: +972 72 2507879
galimimport@gmail.com
www.galimimport.com

Latvia

Elevet SIA
Vestienas street 20
LV 1035 Riga
Phone: +371 25708022
Fax: +371 67574023
elevet@elevet.lv
www.elevet.lv

Netherlands

Escape Mobility
Bochholtzerweg 14 c
6369 TG Simpelveld
Phone: +31 455280670
info@escape-mobility.com
www.escape-mobility.com

Netherlands

Evacuatieexpert
Sloetsweg 5
7557 HS Hengelo
Phone: +31 748539984
info@evacuatieexpert.nl
www.evacuatieexpert.nl

Poland

Horyzonty bez Granic
Aneta Angowska
ul. F. Fenikowskiego 7A/35
84-240 Reda
Phone: +48 501 422992
biuro@horyzontybezgranic.pl
www.horyzontybezgranic.pl

Poland

Haltia Rehabilitacja & Ortopedia
ul. Paprotna 8
51-117 Wroclaw
Phone: +48 71 3528415
Fax: +48 68 4124206
info@haltia.pl
www.haltia.pl

Poland

Reha Bloch
ul. Lermontowa 3
60-461 Poznań
Phone: +48 61 8423546
Fax: +48 61 8423546
biuro@rehabloch.pl
www.rehabloch.pl

Portugal

WELL4ALL Iberica
Rua Major Joao Luis de Moura
Famoes Park, Armazem W1685-253
Famoes - Lisboa
Phone: +351 1 219 349496
Fax: +351 1 219 330188
alice.rosa@well4alliberica.pt
www.well4alliberica.pt

Russia

CTAPR Drushby Str. 34
241030 Bryansk
Phone: +7 4832 321132
info@ctapr.ru
www.ctapr.ru

Slovenia

JR Product d.o.o. Stegne 7
1000 Ljubljana
Phone: +386 1511 4482
Fax: +386 1511 4483
info@jr-product.si
www.jr-product.si

Spain

Stannah Incisa S.L.U.
c/ Eduard Marquina 26
08911 Badalona
Phone: +34 93 4646770
Fax: +34 93 3891534
otecnica@stannah.es
www.stannah.es

Spain

Enier
Av. De Franca 205
17840 Sarrià de Ter
Phone: +34 972 171374
Fax: +34 972 170678
enier@enier.com
www.enier.com

Switzerland

BACO Service AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
Phone: +41 33 4394141
Fax: +41 33 4394142
bern@hoeggliift.ch
www.baco-ag.ch

Switzerland

Garaventa Liftech AG
Fännring 2
6403 Küssnacht am Rigi
Phone: +41 41 8547880
info@garaventalift.ch
www.garaventalift.ch

Switzerland


Rigert AG Treppenlifte
Fännring 2
6403 Küssnacht am Rigi
Phone: +41 41 8542010
info@rigert.ch
www.rigert.ch

United Kingdom

Evaccess
Swallow Evacuation and Mobility
Products Limited
197 Vicarage Road,
Kings Heath B14 7QQ
Birmingham
Phone: +44 121 4443690
info@evaccess.uk
www.evaccess.uk



M. BARTELS
REHA IM- & EXPORT GMBH

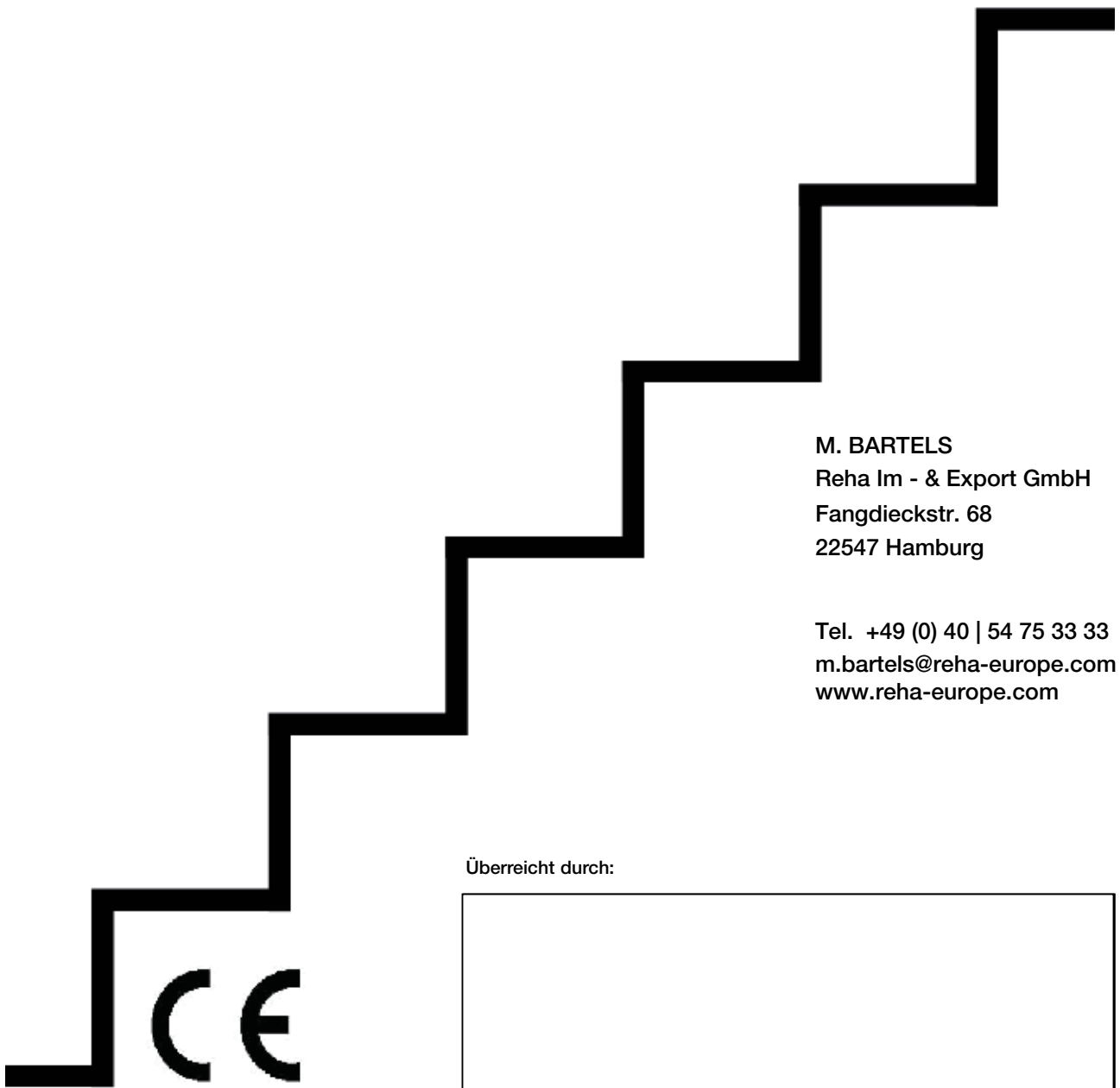

M. BARTELS
Reha Im - & Export GmbH
Fangdieckstr. 68
22547 Hamburg

Tel. +49 (0) 40 | 54 75 33 33
m.bartels@reha-europe.com
www.reha-europe.com

Überreicht durch: